
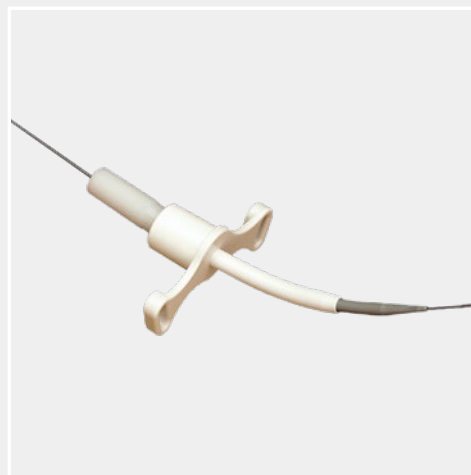


Critical Care

Difficult Airway Brochure - Japan

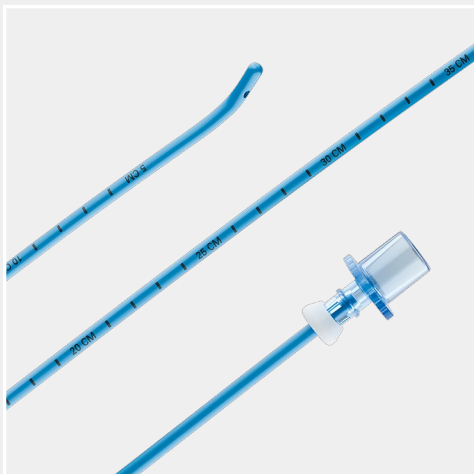

Difficult airway 製品

C-CAE	Frova 気管内挿管用イントロデューサ	3
C-CAE	Aintree 気管内挿管用カテーテル	4
C-CAE	COOK 気管内チューブ交換用カテーテル	5
C-CAE	COOK 気管内チューブ交換用カテーテル (Extra Firm with Soft Tip)	6
C-TCCS	Melker 緊急用輪状甲状膜切開用カテーテルセット	7



Frova 気管内挿管用イントロデューサ

声門の目視が困難な患者さんにおいて、気管挿管を補助するために使用します。

- ・声門の目視が困難な場合における気管内チューブの気管挿管を補助することを目的として、先端部を滑らかなカーブ形状に設計しています。
- ・補強用カニューラの使用により、イントロデューサ先端部の柔軟性に配慮しつつ、手前側および中央部の剛性を考慮した設計としています。
- ・通気のため中空で、先端部に側孔があります。
- ・1 cm 刻みに付いているマーカにより、イントロデューサの挿入位置の把握を補助します。
- ・着脱可能な Rapi-Fit® コネクタを使用し、必要に応じて呼吸器回路と接続し、酸素供給ができます。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	イントロデューサ 外径 Fr	イントロデューサ 全長 cm	適合気管内 チューブ ¹ 内径 mm	付属アダプタ	数量
補強用カニューラ付き						
G12591	C-CAE-8.0-35-FII	8	35	≥3	15 mm およびルアーロック	1
G23646	C-CAE-14.0-70-FII ²	14	70	≥6	15 mm およびルアーロック	1
補強用カニューラなし						
G23645	C-CAE-14.0-70-FI	14	70	≥6	15 mm およびルアーロック	1

販売名：気管内チューブ交換用・挿管用カテーテル／コネクタ 認証番号：302AABZX00025000


イントロデューサのみ						
G48303	C-CAE-14.0-70-FIC	14	70	≥6	—	10
G53517	C-CAE-14.0-70-FIC-SPOPS ^{2,3}	14	70	≥6	—	1

販売名：気管内挿管用イントロデューサロング 届出番号：13B1X10023CC0011


1. 気管内チューブは別売りです。
2. 非在庫品目
3. 携帯性と輸送の利便性を考慮して U 型に包装されています。



補強用カニューラ

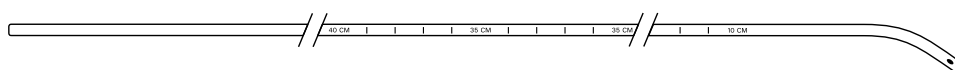

Frova イントロデューサ

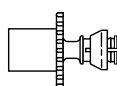

Rapi-Fit コネクタ
15 mm



Rapi-Fit コネクタ
ルアーロック



Aintree 気管内挿管用カテーテル


気管支鏡下での気管挿管の補助と、非侵襲的な気管内チューブの交換に使用します。

- 通気のため中空で、先端部に側孔があります。
- 気管支鏡を併用します。
- 1 cm 刻みのマーカ付きで、カテーテル挿入位置の把握を補助します。
- 着脱可能な Rapi-Fit® コネクタを使用し、必要に応じて呼吸器回路と接続し、酸素供給ができます。


グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 外径 Fr	カテーテル 全長 cm	カテーテル 先端部内径 mm	適合気管内 チューブ* 内径 mm	付属アダプタ
G10789	C-CAE-19.0-56-AIC	19	56	4.7 ~ 4.8	≥7	ダブルシーベル、15 mm およびルアーロック

販売名：気管内チューブ交換用・挿管用カテーテル／コネクタ 認証番号：302AABZX00025000


* 気管内チューブは別売りです。

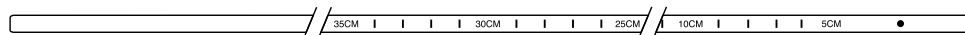

Aintree カテーテル

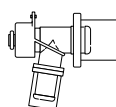


ダブルシーベル
コネクタ

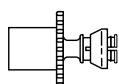

Rapi-Fit コネクタ
15 mm



Rapi-Fit コネクタ
ルアーロック

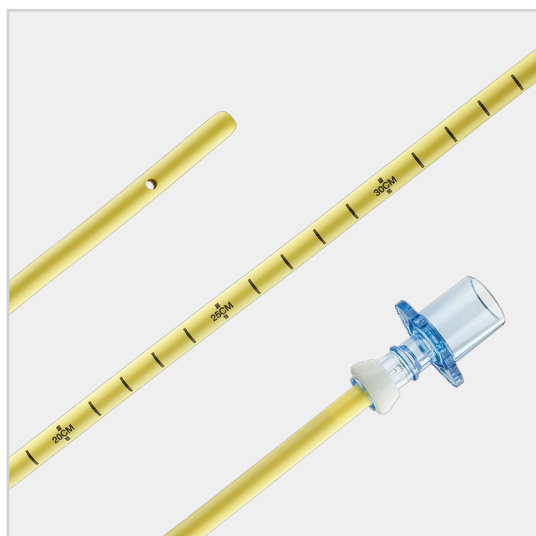

COOK 気管内チューブ交換用カテーテル


非侵襲的な気管内チューブの交換に使用します。

- ・ 内部組織への損傷リスクに配慮し、カテーテル先端部を丸みのある形状に設計しています。
- ・ 通気のため中空で、先端部に側孔があります。
- ・ 1 cm 刻みのマーカ付きで、カテーテル挿入位置の把握を補助します。
- ・ 着脱可能な Rapi-Fit® コネクタを使用し、必要に応じて呼吸器回路と接続し、酸素供給ができます。


グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 外径 Fr	カテーテル 全長 cm	適合気管内 チューブ* 内径 mm	付属アダプタ
G07833	C-CAE-8.0-45	8	45	≥3	15 mm およびルアーロック
G06732	C-CAE-11.0-83	11	83	≥4	15 mm およびルアーロック
G07873	C-CAE-14.0-83	14	83	≥5	15 mm およびルアーロック
G05880	C-CAE-19.0-83	19	83	≥7	15 mm およびルアーロック

販売名：気管内チューブ交換用・挿管用カテーテル／コネクタ 認証番号：302AABZX00025000

* 気管内チューブは別売りです。

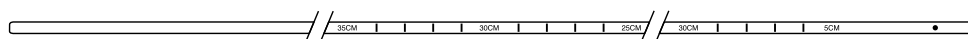

COOK 気管内チューブ交換用カテーテル

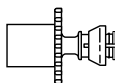

Rapi-Fit コネクタ
15 mm



Rapi-Fit コネクタ
ルアーロック



COOK 気管内チューブ交換用カテーテル (Extra Firm with Soft Tip)


非侵襲的な気管内チューブの交換に使用します。

- 内部組織への損傷リスクに配慮し、カテーテル先端部を丸みのある柔軟な形状に設計しています。
- カテーテルの剛性に配慮した設計となっており、ダブルルーメンチューブの交換が可能です。
- 通気のため中空で、先端部に側孔があります。
- 1 cm 刻みのマーカ付きで、カテーテル挿入位置の把握を補助します。
- 着脱可能な Rapi-Fit® コネクタを使用し、必要に応じて呼吸器回路と接続し、酸素供給ができます。


グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 外径 Fr	カテーテル 全長 cm	適合気管内 チューブ* 内径 mm	付属アダプタ	側孔の数
G36401	C-CAE-11.0-100-DLT-EF-ST	11	100	≥4	15 mm およびルアーロック	6
G36402	C-CAE-14.0-100-DLT-EF-ST	14	100	≥5	15 mm およびルアーロック	2

販売名：気管内チューブ交換用・挿管用カテーテル／コネクタ 認証番号：302AABZX00025000

* 気管内チューブは別売りです。

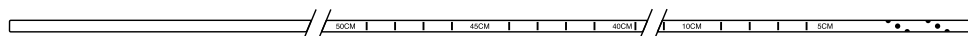


COOK 気管内チューブ交換用カテーテル
(Extra Firm with Soft Tip)

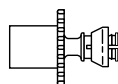

Rapi-Fit コネクタ
15 mm



Rapi-Fit コネクタ
ルアーロック

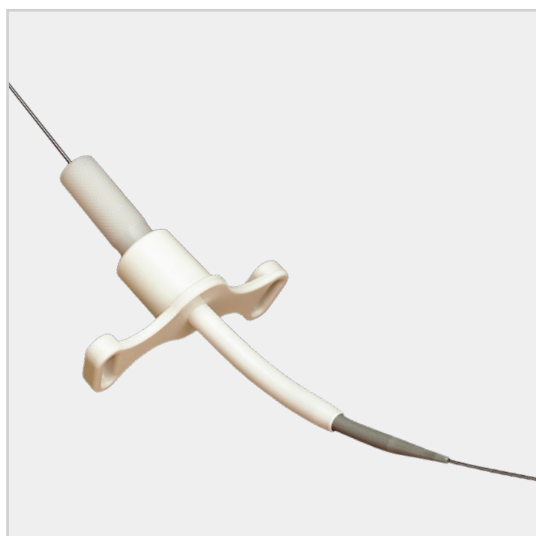


Melker 緊急用輪状甲状膜切開用 カテーテルセット

緊急時の気管内挿管が困難な場合において、気道を確保するために使用します。


- セルディンガー法を用いた気道アクセス手技において、輪状甲状膜からのアクセスを補助することを目的としています。
- 輪状甲状膜切開用カテーテルは、さまざまな患者さんに対応できるよう、3種類のサイズを展開しています。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 全長 cm	カテーテル 内径 mm	カテーテル 外径 mm
G06245	C-TCCS-350	3.8	3.5	5.1
G06246	C-TCCS-400	4.2	4.0	5.9
G04652	C-TCCS-600	7.5	6.0	8.8


販売名：気道アクセス用デバイス-2 認証番号：308AABZX00004000

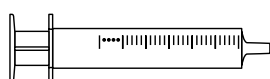

シリンジ
5 cc

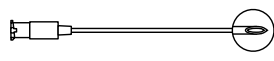

イントロデューサ針（タイプ1）

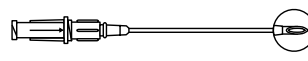


イントロデューサ針（タイプ2）




スカルペル（形番 No.15）




ガイドワイヤ

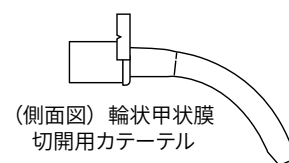


（側面図）輪状甲状膜
切開用カテーテル

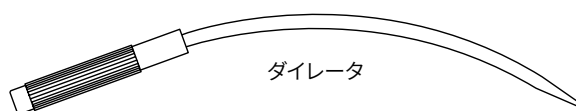

ダイレータ

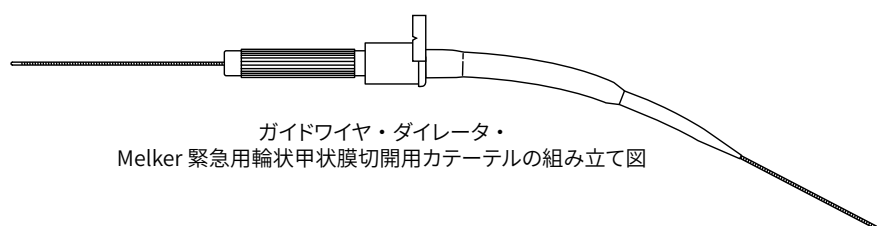

ガイドワイヤ・ダイレータ・
Melker 緊急用輪状甲状膜切開用カテーテルの組み立て図

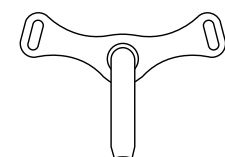

（正面図）輪状甲状膜
切開用カテーテル



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL : 0120-289-902
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com