


Günther Tulip®

VENA CAVA FILTER

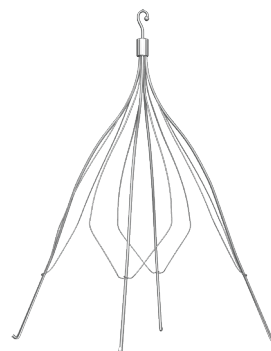


with
NavAlign™
Delivery

ギンターチューリップ
下大静脈フィルター


頸静脈からのアプローチ

本書は要約版留置ガイドです。
詳細は電子化された添付文書をご確認ください。


1 下大静脈にシースを進めます。

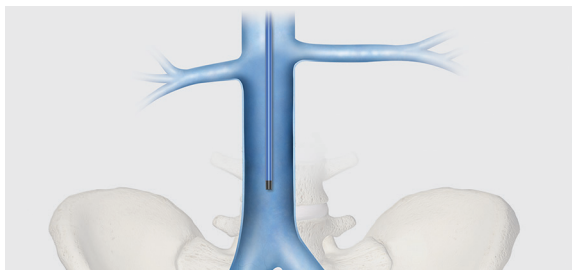


2 シース内にフィルターを装填します。

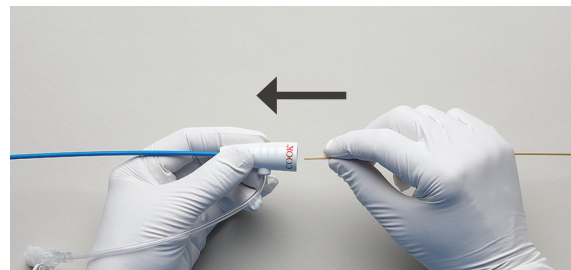

3 イントロデューサとプロテクションシースを接続します。

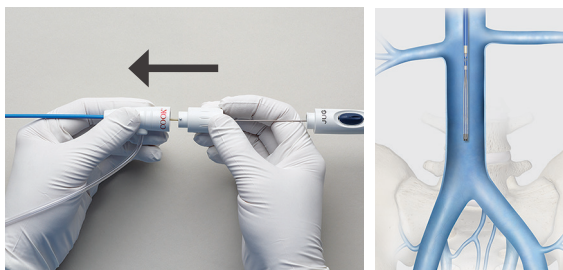


4 フィルターのシースを引き戻します（シースを引き戻す際は後ろの手を固定してください）。

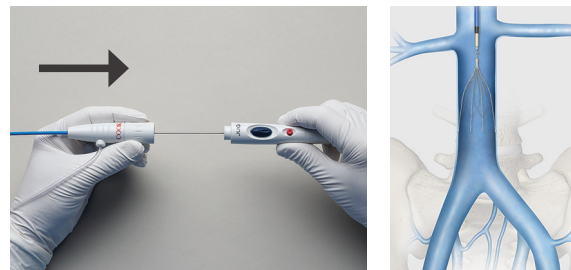

5 赤いセーフティロックを押します。




6 青いリリースボタンを押して展開します。

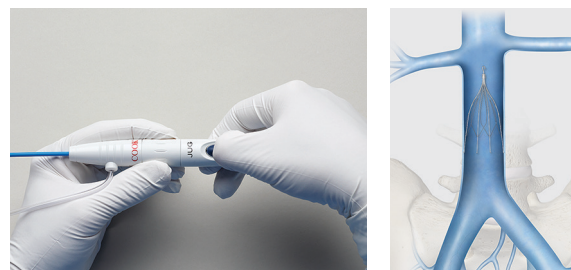

Günther Tulip®

VENA CAVA FILTER

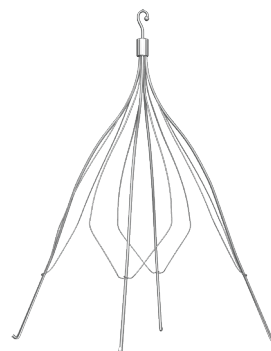

with
NavAlign™
Delivery

ギンターチューリップ
下大静脈フィルター


大腿静脈からのアプローチ

本書は要約版留置ガイドです。
詳細は電子化された添付文書をご確認ください。


1 下大静脈にシースを進めます。




2 シース内にフィルターを装填します。

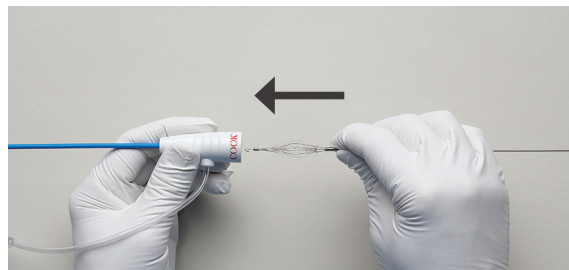

3 タクティルバンプが止血弁に接触するまでフィルターを進めます。

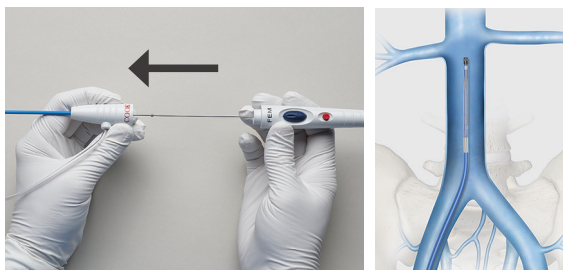

4 フィルターのシースを引き戻します（シースを引き戻す際は後ろの手を固定してください）。

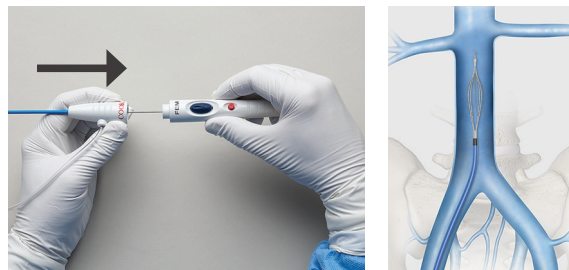

5 赤いセーフティロックを押します。



6 青いリリースボタンを押して展開します。



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
TEL: 0120-289-902
cookmedical.co.jp

詳細については、クックメディカル担当者およびカスタマーサービスまでご連絡ください。